

Guía para nuevos pacientes y sus familiares

PARA VOSOTROS QUE VAIS A UTILIZAR **OPTUNE GIO®**



¿Qué es Optune Gio®?



Optune Gio es un dispositivo que administra el tratamiento de TTFields – Tumor Treating Fields (campos eléctricos para el tratamiento de tumores) a través de parches adhesivos que se colocan en la cabeza del paciente, denominados Transducer Arrays (transductores).



Optune Gio tiene un tamaño reducido (18cm-19cm-5cm) y es ligero: sólo pesa 1,2 kg.



Como Optune Gio es portátil, se puede recibir tratamiento prácticamente en cualquier lugar.



Siguiendo las instrucciones de su médico, puede utilizar Optune Gio durante su rutina diaria: en el trabajo, en eventos sociales e incluso mientras viaja.





No es necesario ir al hospital para recibir el tratamiento con Optune Gio, es un tratamiento a domicilio.




¿Cómo funciona Optune Gio?

Los TTFields interfieren en la división de las células cancerosas de su tumor.


Optune Gio utiliza TTFields, que consiste en campos eléctricos que pueden impedir que las células cancerosas se dividan. Esto ayuda a ralentizar el crecimiento del tumor. Además, Optune Gio puede incluso destruir las células cancerosas existentes.

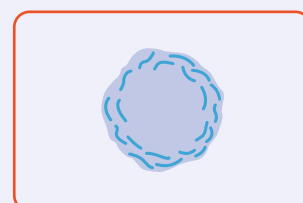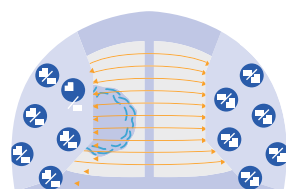


Célula cancerosa

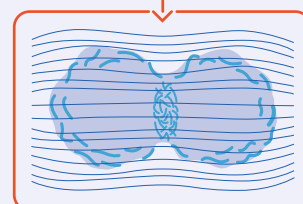

Optune Gio produce TTFields, que interfieren con la división de las células cancerosas.

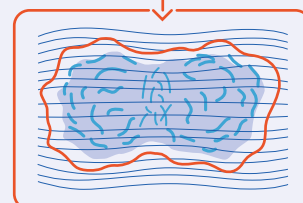

Los TTFields pueden ralentizar o detener la división de las células cancerosas.

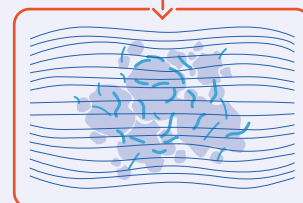

Los TTFields pueden destruir las células cancerosas

*TTFields : Tumor Treating Fields

Inicio y asistencia técnica durante el tratamiento con Optune Gio

Prescripción

Usted firma el formulario de prescripción, con su información de contacto.

Llamada de bienvenida

Novocure® realiza una "llamada de bienvenida" con usted, para explicarle el proceso de inicio y del tratamiento y el soporte técnico que se le proporciona.

Recepción del dispositivo médico

Recibe el equipo médico en su domicilio (o en otro lugar inicio del tratamiento determinado).

Inicio del tratamiento

Su persona de soporte técnico le forma a usted y a sus familiares sobre cómo utilizar Optune Gio y le ayuda a resolver preguntas técnicas y prácticas. La formación se realizará normalmente en su domicilio.

Seguimiento del uso

Usted y su médico recibirán informes de uso del dispositivo cada mes, para ayudarle a seguir el tratamiento.

Durante el tratamiento recibirá apoyo continuo relacionado con Optune Gio

Su persona de soporte técnico le asistirá durante todo el tratamiento, por ejemplo solicitando el envío de los Arrays, respondiendo a dudas técnicas o descargando los informes de uso del dispositivo.



Imagen de una actriz

Si tiene preguntas médicas sobre su enfermedad o tratamiento deberá contactar con su médico.

Si tiene dudas sobre el dispositivo o su uso, por favor lea el Manual de Usuario.


Optune Gio en la vida diaria de un paciente

¿Es posible mantener una rutina de vida normal durante el tratamiento con Optune Gio?

Optune Gio es un dispositivo portátil diseñado para integrarse en su rutina diaria. Por lo tanto, durante el tratamiento se pueden seguir realizando las actividades diarias y las rutinas habituales. Para su comodidad, si lo considera necesario, puede llevar un gorro ligero, un pañuelo o una peluca (que sean transpirables) encima de los Arrays.

¿Cuánto tiempo debo usar Optune Gio?

Al inicio del tratamiento con Optune Gio, su médico discutirá con usted cuánto tiempo debe durar el tratamiento con Optune Gio. Para lograr la mejor respuesta posible al tratamiento, Optune Gio debe utilizarse de forma continua. Un ensayo clínico de gran envergadura con TTFields ha demostrado que el uso más prolongado posible de Optune Gio, ha producido una mejor respuesta al tratamiento.

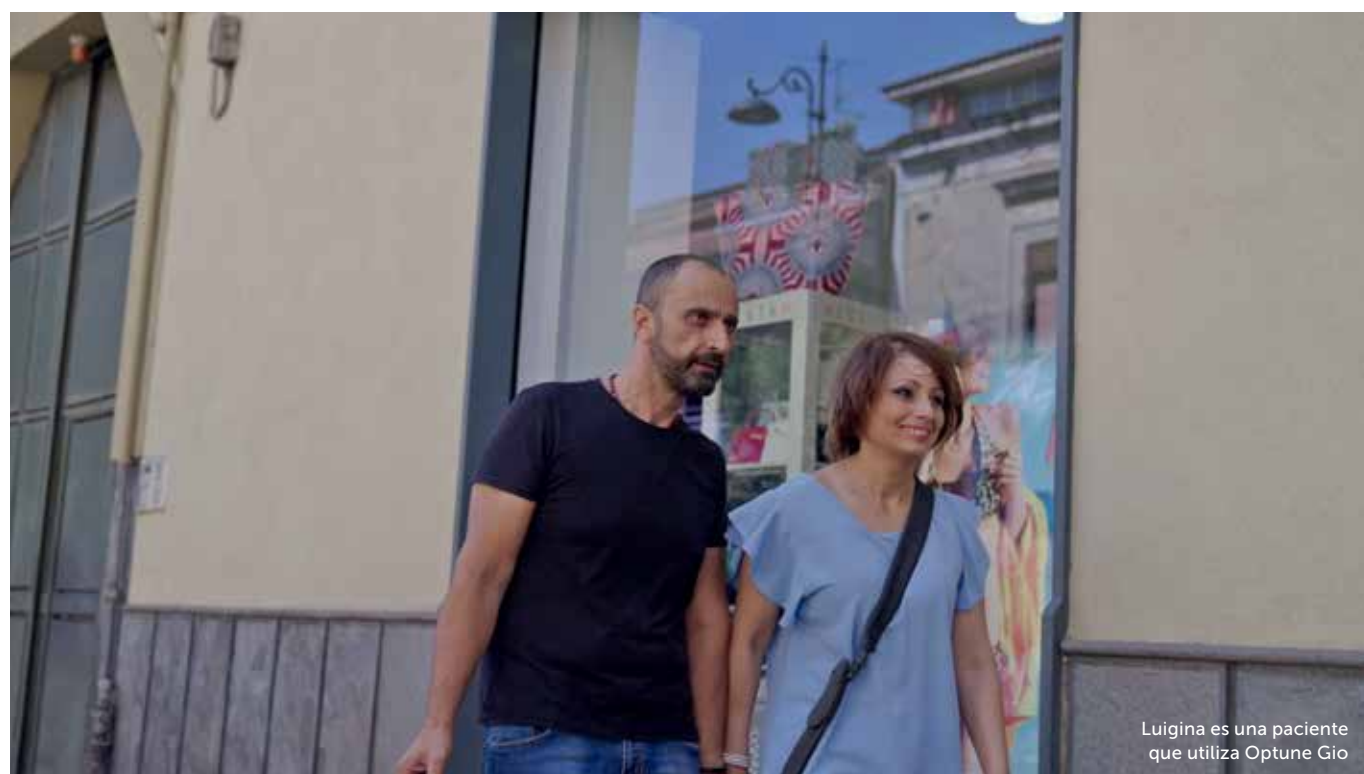

Luigina es una paciente que utiliza Optune Gio

¿Tiene Optune Gio efectos secundarios?

En general, el tratamiento con Optune Gio se tolera bien. El efecto secundario más común asociado al tratamiento con Optune Gio es la irritación de la piel del cuero cabelludo bajo los Arrays. Por lo general, esta irritación de la piel se pueden manejar con éxito siguiendo las medidas recomendadas por su médico.

¿Puedo llevarme Optune Gio de viaje?

Se puede viajar con Optune Gio. Si va a volar puede ser necesario un certificado. Hable con su persona de soporte técnico antes del viaje para que le facilite la ayuda necesaria.



Ingeborg es una paciente que utiliza Optune Gio

¿Se puede utilizar Optune Gio por la noche mientras se duerme?

Sí, el dispositivo de tratamiento puede utilizarse por la noche con la fuente de alimentación, por lo que no es necesario cambiar las baterías.



Imagen de una actriz

¿Qué debo saber antes de empezar a tomar Optune Gio?

- Optune Gio está diseñado para adaptarse a sus rutinas diarias:
 - En casa
 - Al aire libre
 - Durante las actividades diurnas
 - Mientras duerme
- Optune Gio debe usarse la mayor parte del tiempo posible cada día.
- El cuero cabelludo debe afeitarse para que los Arrays estén en contacto directo con el mismo cabello.
- Los Arrays se deben cambiar periódicamente (normalmente, cada 3 o 4 días). Un asistente (familiar/amigo) facilitará el proceso para cambiar los Arrays.
- Los Arrays pueden cubrirse con un gorro ligero, un pañuelo, una peluca, etc.

Para mas información sobre Optune Gio por favor lea el Manual de Usuario.





Imagen de una actriz

Para más información sobre Optune Gio, por favor lea el Manual de Usuario.
<https://manuals.novocure.eu/>

El folleto contiene fotos de pacientes.

Las fotografías se utilizan con la aprobación del paciente y reflejan su estado de salud en el momento en que se tomó la imagen.

novocure®

Novocure Spain S.L.

©2024 Novocure GmbH. Todos los derechos reservados.

Optune Gio y Novocure son marcas registradas de Novocure GmbH.

ESP-OPG-00002 v 2.0 Octubre de 2024.

OPTUNE
GIO®