



Para pacientes diagnosticados recientemente con GBM

OPTUNE GIO® PUEDE DARLE EL PODER PARA AYUDARLO A VIVIR MÁS TIEMPO

Obtenga más información sobre Optune Gio.

Encuentre respuestas a sus preguntas sobre Optune Gio, un tratamiento aprobado para glioblastoma (GBM) que ha demostrado extender la supervivencia en pacientes diagnosticados recientemente con GBM.

Consulte la importante información de seguridad en las páginas 14 y 15.

Taylor es un paciente que usa Optune Gio.

Las imágenes de los pacientes reflejan su estado de salud en el momento en que se tomó cada foto.



Gill es un paciente que usa Optune Gio.

Las imágenes de los pacientes reflejan su estado de salud en el momento en que se tomó cada foto.
US-OPG-00444 v1.0 Enero 2024

¿Qué es Optune Gio® y cómo funciona?

Optune Gio es un dispositivo portátil que genera campos de tratamiento de tumores (TTFields), que son campos eléctricos que alteran la división de células cancerosas y pueden hacer que las células mueran.

Usando 4 parches adhesivos, llamados transductores, se genera la terapia de TTFields en el área de su cuerpo donde está el cáncer. TTFields destruye algunas células cancerosas por completo y no ha mostrado que afecte las células sanas de forma importante.



La vida con Optune Gio®

¿Cómo se adapta el Optune Gio a mi plan de tratamiento?

Diagnóstico reciente de GBM

Si acaban **de diagnosticarle GBM**, Optune Gio se usa junto con quimioterapia* después de la operación y radiación con quimioterapia.

*Temozolomida, también conocida como TMZ o Temodar®.


¿Durante cuánto tiempo voy a necesitar Optune Gio?

Un estudio clínico completo mostró que Optune Gio debe usarse durante al menos el 75% del tiempo (18 horas al día) para obtener la mejor respuesta del tratamiento.

- Las personas que usaron Optune Gio durante más horas al día alcanzaron el mejor beneficio de supervivencia.
- Cuando comience a usar Optune Gio, trabaje con su médico para hacer su propio plan individualizado sobre cuánto tiempo debe usar Optune Gio.

Después de comenzar a usar Optune Gio, usted y su médico pueden revisar su tratamiento y cómo se adapta a su estilo de vida para determinar el mejor camino a seguir.

Consulte la importante información de seguridad en las páginas 14 y 15.

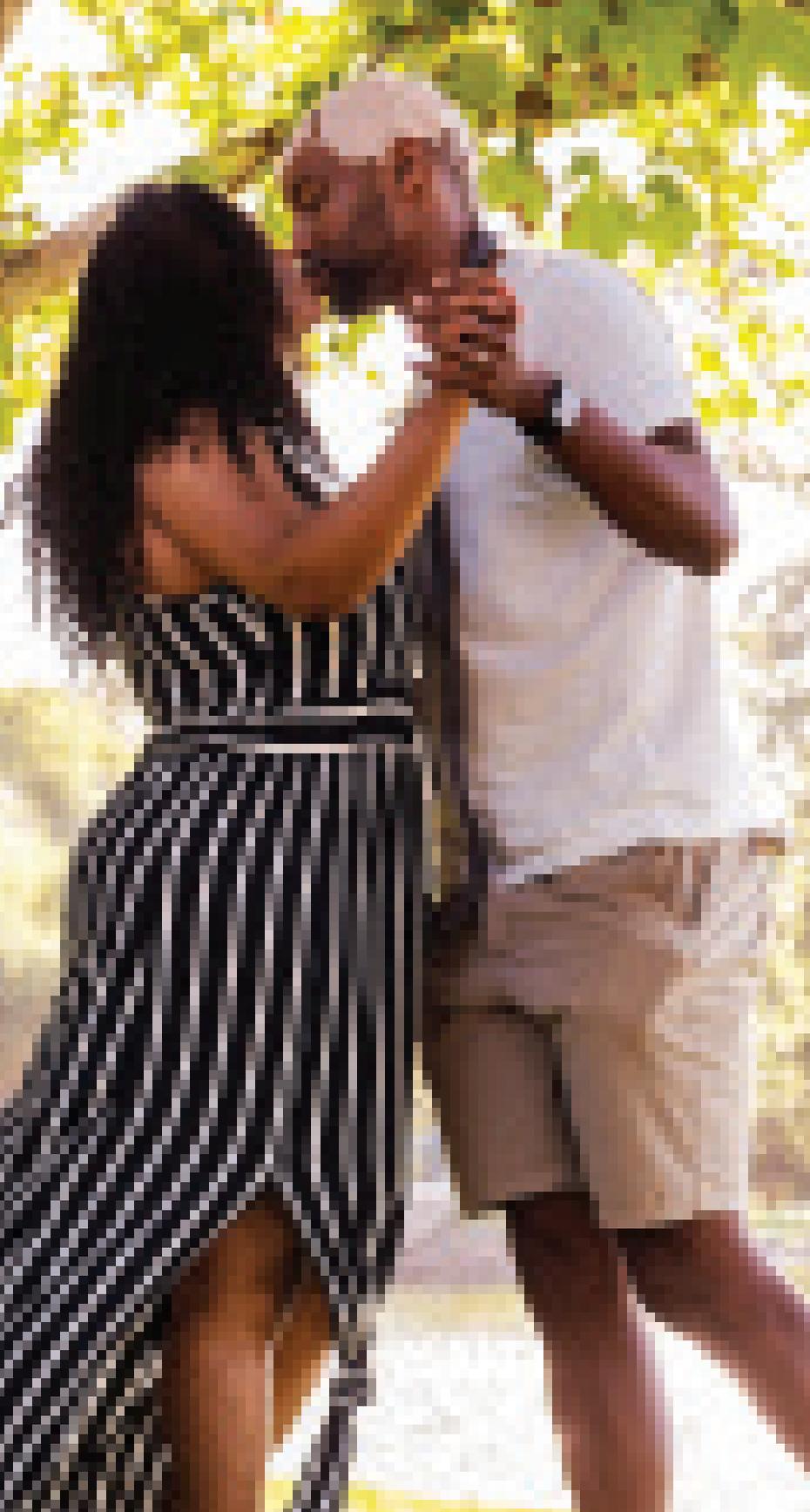

**Osmond es un paciente
que usa Optune Gio.**

Las imágenes de los
pacientes reflejan su
estado de salud en el
momento en que se
tomó cada foto.

Optune Gio® para personas diagnosticadas recientemente con GBM

Se demostró que Optune Gio + TMZ extienden la supervivencia

En un estudio clínico completo, las personas que incorporaban Optune Gio a la quimioterapia* tenían una mayor posibilidad de vivir más tiempo que las que solo usaban quimioterapia.



Casi la mitad de las personas que usan Optune Gio + quimioterapia* estaban vivas a los 2 años, comparado con el 31% de las personas con solo quimioterapia.

Mejor supervivencia a los 5 años

Optune Gio +
quimioterapia*

vs.

Solo
quimioterapia

13%

5%

Optune Gio trata la parte donde está su tumor de GBM **sin aumentar los efectos secundarios relacionados con la quimioterapia.**

En un estudio clínico grande, Optune Gio **se usó de forma segura junto** con quimioterapia por 5 años.

El 52% de los pacientes presentó irritación leve a moderada debajo de los transductores, con solo el 2% de los pacientes presentando afectación grave en la piel.

*Temozolomida, también conocida como TMZ o Temodar®.

Consulte la importante información de seguridad en las páginas 14 y 15.

Optune Gio para personas diagnosticadas recientemente con GBM

Se demostró que mantiene la calidad de vida[†]

Las personas que integraban Optune Gio a la quimioterapia en el estudio pudieron **mantener su calidad de vida (bienestar mental, emocional y físico)**.



Bienestar mental



Bienestar emocional



Bienestar físico



Jeanneane es una paciente que usa Optune Gio.

Antes de que comience la terapia con Optune Gio, considere algunos de los posibles beneficios y efectos secundarios. Algunos beneficios de Optune Gio pueden variar en función de dónde esté en su diagnóstico y plan de tratamiento.

[†]La calidad de vida se midió hasta los 12 meses.

Las imágenes de los pacientes reflejan su estado de salud en el momento en que se tomó cada foto.

Optune Gio[®] Buddy Program

Si usted o un ser querido está considerando o recién empezó a usar Optune Gio, ayuda hablar con alguien que sepa cómo funciona Optune Gio. Optune Gio Buddy Program lo conecta con usuarios o cuidadores que quieren compartir con usted lo que han aprendido.*

Puede hablar con un usuario actual o un compañero de atención sobre:

- Cómo integraron Optune Gio a su vida diaria
- Experiencias personales con Optune Gio
- Consejos para superar los retos y encontrar apoyo

Hable con un amigo



¡Programe su llamada hoy mismo! 1-844-247-1636



Visite OptuneGioBuddy.com para registrarse.

*Tenga en cuenta que no podemos darle recomendaciones médicas ni hablar de los resultados personales del tratamiento porque cada persona es diferente. Hable con su médico si tiene preguntas médicas.



Kim es una paciente que usa Optune Gio.

MyNovocure™

El apoyo se creó pensando en usted.

MyNovocure está aquí para ayudarlo a sentirse más seguro con sus siguientes pasos, con recursos disponibles durante todo el tratamiento. Ya sea para responder sus preguntas o ayudarlo a volver a pedir suministros, el apoyo de MyNovocure está diseñado pensando en usted. Nuestro objetivo es darle apoyo personalizado desde el día 1 y en cada paso del camino.



Craig es un paciente que usa Optune Gio.

Las imágenes de los pacientes reflejan su estado de salud en el momento en que se tomó cada foto.

Consulte la importante información de seguridad en las páginas 14 y 15.

Su equipo de MyNovocure

Con MyNovocure, usted tiene un equipo de expertos listo para apoyarlo durante todo su tratamiento. Su equipo está listo para ayudarlo con asistencia para reembolso, configuración y preguntas sobre el dispositivo, educación sobre el producto y resolución de problemas. Su equipo de apoyo incluye:

- **Apoyo para reembolso:** Podemos ayudarlo a comprender cómo se puede cubrir su terapia de Novocure y minimizar su costo.
- **Apoyo en el tratamiento:** Podemos ayudarlo respondiendo sus preguntas sobre el tratamiento y dándole apoyo durante todo su proceso.
- **Apoyo con el dispositivo:** Lo ayudaremos a configurar su dispositivo, programar registros futuros y resolver cualquier problema que pudiera tener.

Introducción

Una vez que su proveedor de atención médica le recete Optune Gio, recibirá una llamada de bienvenida de parte de un miembro del equipo de MyNovocure para ayudarlo a configurarlo con su tratamiento.

Apoyo para reembolso

Recomendación de expertos para guiarlo en el proceso de cobertura

Su equipo de MyNovocure trabajará para responder sus preguntas sobre economía, minimizar sus costos y ayudarlo a comenzar el tratamiento con Optune Gio de inmediato.

Su equipo de MyNovocure está aquí para usted

Puede confiar en que el equipo de MyNovocure está ahí para usted cuando lo necesite. MyNovocure puede ayudarlo respondiendo sus preguntas desde el momento en que le recetan el tratamiento y 24/7 durante todo su tratamiento.

Es importante saber que MyNovocure no puede dar recomendaciones médicas. Para asegurarse de que recibe el apoyo adecuado, haga cualquier pregunta que pudiera tener sobre el tratamiento a su médico.

Obtenga apoyo personalizado 24/7



Llame a MyNovocure
al 1-855-281-9301



Envíe un correo electrónico
a support@mynovocure.com



Scott es un paciente que usa Optune Gio.

Las imágenes de los pacientes reflejan su estado de salud en el momento en que se tomó cada foto.

US-OPG-00444 v1.0 Enero 2024



Osmond es un paciente que usa Optune Gio.

Las imágenes de los pacientes reflejan su estado de salud en el momento en que se tomó cada foto.

Importante información de seguridad

¿Para qué condiciones está aprobado Optune Gio® como tratamiento?

Optune Gio es un dispositivo portátil, aprobado por la FDA, indicado para tratar un tipo de cáncer del cerebro llamado glioblastoma multiforme (GBM) en pacientes mayores de 22 años.

Diagnóstico reciente de GBM

Si acaban de diagnosticarle GBM, Optune Gio se usa junto con una quimioterapia llamada temozolomida (TMZ) si:

- el profesional de atención médica que lo atiende le confirmó el diagnóstico de cáncer, **Y**
- lo operaron para extraerle la mayor parte posible del tumor.

GBM recurrente

Si el tumor ha vuelto a aparecer, Optune Gio se puede usar por sí solo, como alternativa a la terapia médica estándar si:

- ya lo trataron con operación y radiación, no funcionaron o ya no están funcionando, **Y**
- lo trataron con quimioterapia y el profesional de atención médica le confirmó el diagnóstico de GBM.

¿Quiénes no deberían usar Optune Gio?

Optune Gio no es para todos. Hable con su médico si tiene:

- **un dispositivo médico implantado (derivación programable), un defecto en el cráneo (hueso que falte sin reemplazo) o un fragmento de bala.** Optune Gio no se ha probado en personas con dispositivos electrónicos implantados, que pueden hacer que los dispositivos no funcionen correctamente, ni se ha probado en personas con defectos en el cráneo o fragmentos de bala, que pueden hacer que no funcione correctamente.

- **Una sensibilidad conocida a los hidrogeles conductores** (el gel de los transductores que se ponen en el cuero cabelludo, como los que se usan en los EKG). Cuando Optune Gio entra en contacto con la piel, podría causar más enrojecimiento y comezón o, en raras ocasiones, podría causar una reacción alérgica que ponga en peligro la vida.

No use Optune Gio si está embarazada o planea embarazarse.

Se desconoce si Optune Gio es seguro o eficaz durante el embarazo.

¿Qué debería saber antes de usar Optune Gio?

Optune Gio debe usarse únicamente después de recibir capacitación de personal calificado, como su médico, un enfermero u otro personal médico que haya completado un curso de capacitación de Novocure®, el fabricante de Optune Gio.

- No use ninguna pieza que no viniera con el kit de tratamiento Optune Gio que le envió Novocure o que le dio su médico.
- No moje el dispositivo ni los transductores.
- Si tiene una condición de la piel grave subyacente en el cuero cabelludo, hable con su médico sobre si eso pudiera impedir o interferir temporalmente el tratamiento de Optune Gio.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Optune Gio?

Los efectos secundarios más frecuentes de Optune Gio cuando se usa junto con quimioterapia (temozolomida o TMZ) son bajo recuento de plaquetas, náuseas, estreñimiento, vómito, cansancio, irritación del cuero cabelludo por el dispositivo, dolor de cabeza, convulsiones y depresión. Los efectos secundarios más frecuentes cuando se usa Optune Gio solo son irritación del cuero cabelludo (enrojecimiento y picazón) y dolor de cabeza. Otros efectos secundarios son malestar, espasmos musculares, caídas y úlceras en la piel. Hable con su médico si tiene alguno de estos efectos secundarios o si tiene preguntas.

Visite [OptuneGio.com/Safety](https://www.optunegio.com/safety) para ver las instrucciones de uso (IFU) y obtener información completa sobre las indicaciones, las contraindicaciones, las advertencias y las precauciones del dispositivo.

Use los siguientes recursos para obtener más información sobre el poder de Optune Gio®



Resumen del sistema

- Explore los componentes de Optune Gio.
- Aprenda cómo Optune Gio genera TTFields para retrasar o detener la división de las células del GBM.



Videos para el proceso del paciente

- Aprenda cómo otras personas han integrado Optune Gio a su vida diaria.



Conectar con la comunidad

- Conozca pacientes o cuidadores actuales de Optune Gio en eventos en persona virtuales o locales.
- Conéctese en vivo por teléfono individualmente con un paciente o cuidador actual de Optune Gio.



Escanee aquí para obtener más información y recursos.

novocure®

©2024 Novocure GmbH. Todos los derechos reservados.
Novocure y Optune Gio son marcas comerciales de Novocure GmbH. US-OPG-00444 v1.0 Enero 2024

OPTUNE
GIO™