

**? Cuando fue la última vez que cambió sus transductores?**  
Los transductores se deben cambiar al menos 2 veces por semana (cada 4 días como máximo).

**? Tienen los transductores buen contacto con su piel?**  
De no ser así, puede usar cinta adhesiva o vendajes tubulares para asegurar un buen contacto con el cuero cabelludo.

#### ARREGLO DE TRANSDUCTORES



**Si escucha una alarma, es posible que haya un problema con ABCD.**

Optune Gio está diseñado para alertarlo si no se está administrando el tratamiento. Los siguientes componentes pueden hacer que su dispositivo suene una alarma.

**? Qué activa las alarmas de Optune Gio™?**

**? Escucha un traqueo que sale del dispositivo o está dañado?**  
Puede llamar al apoyo de MyNovocure™ para que lo ayuden con la resolución de problemas.

**? Escucha una alarma inmediatamente después de encender Optune Gio, pero ANTES de oprimir el botón de TTFields?**  
El dispositivo debe estar apagado y la batería debe cambiarse, se puede encender el dispositivo.

#### DISPOSITIVO

**? Está el cable de conexión conectado al dispositivo?**  
El cable de conexión gris debe introducirse cuidadosamente en el dispositivo con las flechas alineadas. Debe escucharse un clic.

**? Hay algún conector del transductor suelto?**  
Todos los cables de los transductores deben insertarse completamente en la caja de conexiones.

#### CONEXIÓN

**? Revisó el indicador de batería?**  
Si el indicador muestra solo 1 punto, se debe cambiar la batería.

**? Está la luz amarilla de la batería encendida?**  
Es un buen momento para cambiar de baterías para tener una carga completa. Cuando la batería esté baja, escuchará una alarma.

#### BATERÍAS

**? Están los transductores demasiado calientes?**  
Se debe evitar la luz del sol. Una cubierta transpirable para la cabeza podría ser útil, o un ventilador. Si el sudor hace que los transductores se muevan, se deben cambiar.

**? Hay algún pelo grueso comenzando a crecer?**  
Incluso si hay una pequeña cantidad de crecimiento de pelo, se deben poner nuevos transductores después de afeitarse. Consulte la Guía para el cuidado del cuero cabelludo para obtener más consejos.

## ? Sabía usted que Optune Gio™ tiene un temporizador?

- Si enciende Optune Gio sin presionar el botón de TTFields, sonará una alarma después de 10 minutos y la luz azul de TTFields parpadeará.
- Presione el botón de TTFields 1 vez para silenciar la alarma. Presione el botón TTFields por segunda vez para iniciar la terapia.



## Obtenga apoyo personalizado 24/7\*



Llame a MyNovocure™ al  
**1-855-281-9301** (llamada sin costo)



Envíe un correo electrónico a MyNovocure a  
[support@novocure.com](mailto:support@novocure.com)

\*Es importante saber que MyNovocure no puede dar recomendaciones médicas. Para asegurarse de que recibe el apoyo adecuado, haga cualquier pregunta que pudiera tener sobre el tratamiento a su médico.

**novocure®**

**OPTUNE  
GIO™**



Craig es usuario de Optune Gio y embajador de pacientes.

# Consejos para la resolución de problemas de Optune Gio™

## GUÍA PARA ENTENDER LAS ALARMAS

Las imágenes de los pacientes reflejan su estado de salud en el momento en que se tomó cada foto.

**novocure®**

**OPTUNE  
GIO™**

# Información sobre qué hacer cuando suenan las alarmas

PANTALLA Y TONOS DE ALARMA	CAUSAS	ALARMA DE DETECCIÓN	ACCIÓN	COMIENCE EL TRATAMIENTO
	<b>Batería CASI agotada</b>	Presione el botón de TTFields.	<b>APAGAR</b>	Presione el botón de TTFields.
	<b>Batería agotada</b>	Presione el botón de TTFields.	Reemplace la batería	<b>ENCENDER</b> (espere aproximadamente 5 segundos)

**Pantalla de terapia TTFields**

**Encendida**  
TTFields azul permanente

**Apagada**  
TTFields no se enciende en azul

PANTALLA Y TONOS DE ALARMA	CAUSAS	ALARMA DE DETECCIÓN	ACCIÓN	COMIENCE EL TRATAMIENTO
	<b>Recordatorio</b> Comience el tratamiento.	Presione el botón de TTFields.		
	<b>Sin conexión</b>	Presione el botón de TTFields.	Revise si los enchufes están conectados.	Presione el botón de TTFields.
	<b>Los transductores superan la temperatura máxima</b>		<b>Busque condiciones más frescas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vaya a un lugar más fresco.</li> <li>Permita que los transductores se enfríen durante aproximadamente 5-10 minutos.</li> <li>Revise el contacto entre los transductores y la piel, presione los transductores y cubra con una red si es necesario.</li> <li>Reemplace los transductores si es necesario.</li> </ul>	
	<b>Todos los otros indicadores de alarma</b>		Consulte el manual del usuario o comuníquese con su especialista de apoyo de dispositivos de Optune Gio.	

Breve resumen de las diferentes alarmas

Si no puede resolver el error solo, o si los enchufes se ven defectuosos, use el cable de conexión de reemplazo.

Cable de conexión de reemplazo

Puede encontrar más información en el manual del usuario o comuníquese con su especialista de apoyo de dispositivos de Optune Gio.