



Información para el cuidado del cuero cabelludo y colocación de los HFE Transducer Arrays

El cuidado adecuado del cuero cabelludo le permitirá maximizar la duración del uso de Optune Gio®.

Imagen de una actriz

El folleto contiene fotos de pacientes. Las fotografías se utilizan con la aprobación del paciente y reflejan su estado de salud en el momento en que se tomó la imagen.



Imagen de una actriz

El cuidado adecuado del cuero cabelludo desempeña un papel importante en la disminución del riesgo de irritación de la piel y puede ayudarle a sacar el máximo partido de su tratamiento con Optune Gio®.

Los pasos que aquí se indican pueden ayudarle a minimizar la posibilidad de irritación de la piel y a maximizar la duración del uso del dispositivo, para que pueda sacar el máximo partido a su tratamiento. La información contenida en este folleto puede ayudarle a usted a:

- Preparar el cuero cabelludo de forma óptima para la colocación de los Arrays
- Colocar correctamente los Arrays
- Minimizar la posibilidad de irritación cutánea.



Paciente utilizando Optune Gio

PREPARACIÓN INICIAL PARA COLOCAR LOS ARRAYS

Rasure su cabello con la afeitadora que le proporciona Novocure

- Asegúrese de que la afeitadora está limpia. Siga el manual de uso de la afeitadora para ello.
- Rasure el cuero cabelludo con cuidado, asegurándose de que no queden zonas sin rasurar correctamente.

Después del rasurado, lave su cuero cabelludo con un jabón neutro para limpiar la piel y eliminar la grasa.

- Antes de colocar los Arrays, asegúrese de que el cuero cabelludo esté completamente seco. Para hacerlo, seque el cuero cabelludo con suaves toques con una toalla (se debe evitar frotar el cuero cabelludo para minimizar las irritaciones de la piel).

Tratamiento del cuero cabelludo

- Si el médico tratante le ha recetado un producto para el tratamiento del cuero cabelludo, debe utilizarlo ahora, sobre la piel limpia y seca. Se debe dejar absorber el producto durante el tiempo necesario según las indicaciones del médico.
- El cuero cabelludo debe limpiarse de residuos del producto del tratamiento. Antes de colocar los Arrays, procederá a limpiarse la piel con jabón neutro y secarse con una toalla a toques. Evitar el uso de alcohol u otras sustancias irritantes.



Imagen de una actriz

PROCESO DE COLOCACIÓN DE LOS ARRAYS


- Lávese bien las manos.
- Asegúrese de que el cuero cabelludo esté completamente seco.
- Los Arrays deben sujetarse por los márgenes evitando tocar los pétalos.
- Los Arrays deben colocarse de acuerdo con el mapa personalizado proporcionado por Novocure®.
- Tras colocar los Arrays, presione ligeramente los pétalos y, a continuación, alinee el adhesivo circundante.
- Los pétalos deben colocarse directamente sobre el cuero cabelludo.
- Si es necesario, se puede utilizar esparadrapo y malla adicional sobre los Arrays para fijarlos en su sitio.

Rotación al cambiar los Arrays

- Para minimizar o evitar lesiones en la piel, se varían los puntos de contacto entre los Arrays y la piel en cada cambio de los mismos.
- Con cada cambio, los Arrays se giran ligeramente en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario.
- De este modo se obtienen dos posiciones ligeramente diferentes (véase la figura siguiente). Cada vez que se cambian los arrays, se pasa de una posición a otra (de 1 a 2, de 2 a 1, etc.).
- Su técnico en soporte de dispositivos le indicará cómo hacerlo.

Nota:

No tire los arrays usados a la basura doméstica, sino deséchelos en la bolsa específica que Novocure le proporcionará. La empresa recogerá la bolsa en su domicilio.

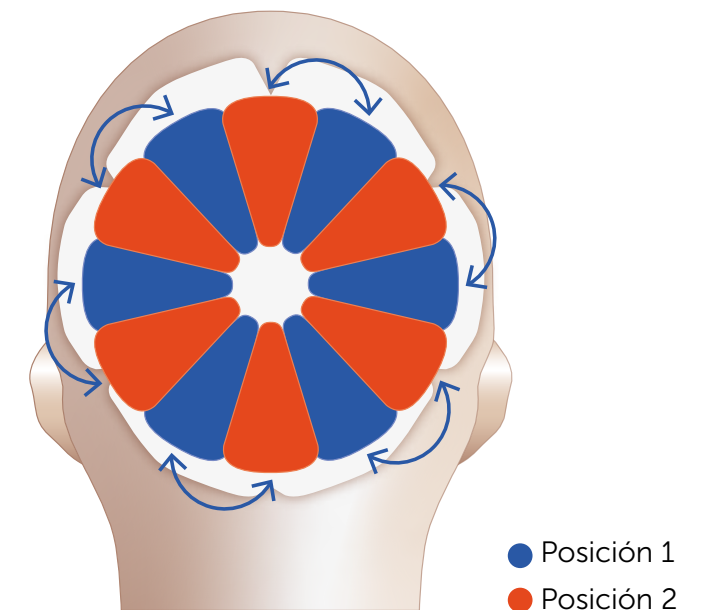

TRATAMIENTO DEL CUERO CABELLUDO

¿Cómo se puede minimizar la posibilidad de irritación cutánea y reducir el riesgo de infecciones?

- Los Arrays deben cambiarse dos veces por semana.
- Evite en lo posible colocar los pétalos del array sobre cicatrices quirúrgicas, defectos óseos o heridas.
- Los arrays pueden cubrirse con un gorro ligero, un pañuelo o peluca que permitan una ventilación adecuada.
- Los Arrays deben retirarse con cuidado. Se puede utilizar aceite para bebés o agua tibia para retirar los Arrays de la piel.
- La posición de los Arrays debe cambiarse al sustituirlos. Evite colocar las Arrays exactamente en el mismo lugar para reducir el riesgo de irritación cutánea.



Una vez retirados los Arrays, revise minuciosamente el cuero cabelludo para examinar si hay heridas abiertas, enrojecimiento, zonas sensibles al dolor, etc. Si observara algún signo de irritación cutánea, póngase en contacto lo antes posible con su médico tratante.

Los Arrays deben sustituirse dos veces por semana. Se recomienda sustituir los Arrays más a menudo, en los siguientes casos:

- Sudoración excesiva, debida al calor o a la actividad física.
- Sensación de incomodidad, picor o desprendimiento de los Arrays del cuero cabelludo
- La capa de gel se vuelve blanda o «viscosa» debido al exceso de humedad del cuero cabelludo.
- Aumento del número de alarmas de dispositivo debido al exceso de temperatura de los Arrays.



Imagen de una actriz



Imagen de una actriz

Para más información sobre Optune Gio®, por favor lea el Manual de Usuario. <https://manuals.novocure.eu/>

novocure®