

Para pacientes con diagnóstico reciente de glioblastoma multiforme

OPTUNE GIO® PUEDE DARLE LA FUERZA PARA AYUDARLO A VIVIR MÁS*



Más información sobre Optune Gio

Encuentre respuestas a sus preguntas sobre Optune Gio, un tratamiento aprobado para glioblastoma (GBM) que se ha comprobado que extiende la supervivencia en pacientes diagnosticados recientemente con glioblastoma multiforme.

Consulte Información importante de seguridad en las páginas 14-15.

OPTUNE
GIO®

I POWER MY LIFE

*Los resultados se basan en un extenso ensayo clínico que compara Optune Gio más quimioterapia con solo quimioterapia.
Representación de actor



Más de 25,000 personas han comenzado a usar Optune Gio®

Representación de actor

Las imágenes reflejan el estado médico de los pacientes en el momento en que se tomó cada foto.

¿Qué es Optune Gio y cómo funciona?

Optune Gio es un dispositivo portátil que libera campos de tratamiento de tumores (TTFields), que son campos eléctricos que interrumpen la división de células de cáncer y pueden hacer que las células mueran.

Usando 4 parches adhesivos, llamados transductores, la terapia de TTFields se administra en el área del cuerpo donde está el cáncer. TTFields destruye por completo algunas células de cáncer y no ha mostrado que afecte significativamente las células sanas.



Optune Gio® tiene estado preferido NCCN

Categoría 1

The **National Comprehensive Cancer Network®** (NCCN) es una alianza sin fines de lucro de los principales centros oncológicos dedicados al avance de la atención oncológica mediante la creación de las Guías de práctica clínica en oncología de NCCN (NCCN Guidelines). Estas NCCN Guidelines se usan para pacientes y profesionales de atención médica en todo el mundo. NCCN recomienda tratamientos basándose en 3 categorías, la Categoría 1 es la recomendación más alta.

Los **campos de tratamiento de tumores** (la tecnología de Optune Gio) ha sido reconocida como tratamiento **preferido Categoría 1** por personas con diagnóstico reciente de glioblastoma multiforme. Optune Gio se ha establecido como un estándar de atención preferido porque ha mostrado resultados comprobados, se considera una terapia segura y, cuando es apropiado, es una opción de tratamiento asequible.

NCCN no ofrece garantías de ningún tipo relacionadas con su contenido, uso o aplicación y renuncia a toda responsabilidad por su aplicación o uso en cualquier forma.

Mencionado con permiso de NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) para cánceres del sistema nervioso central V.1.2023. © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2023. Todos los derechos reservados. Consultado el 18 de septiembre de 2023. Para ver la versión más reciente y completa de las directrices visite en línea [NCCN.org](https://www.nccn.org).



Representación de actor



Representación de actor

Las imágenes reflejan el estado médico de los pacientes en el momento en que se tomó cada foto.

La vida con Optune Gio®

¿Cómo se adapta Optune Gio a mi plan de tratamiento?

Glioblastoma (GBM) de diagnóstico reciente

Si fue **diagnosticado recientemente con glioblastoma multiforme**, Optune Gio se usa junto con quimioterapia* después de la operación y radiación con quimioterapia.

*Temozolomida, también conocido como TMZ o Temodar®.

¿Cuánto tiempo voy a necesitar Optune Gio?

Un estudio clínico completo mostró que Optune Gio se debe usar durante al menos 75 % del tiempo (18 horas al día) para obtener la mejor respuesta del tratamiento.

- Las personas que usaron Optune Gio durante más horas al día alcanzaron el mejor beneficio de supervivencia
- Cuando comience a usar Optune Gio, trabaje con su médico para hacer su propio plan individualizado sobre cuánto tiempo debe usar Optune Gio

Después de comenzar a usar Optune Gio, usted y su médico pueden revisar su tratamiento y cómo se adapta a su estilo de vida para determinar el mejor camino a seguir.

Consulte Información importante de seguridad en las páginas 14-15.



Representación de actor

Las imágenes reflejan el estado médico de los pacientes en el momento en que se tomó cada foto.

Optune Gio® para personas diagnosticadas recientemente con glioblastoma multiforme

Optune Gio más TMZ: Potencia comprobada para extender la supervivencia

En un estudio clínico completo, las personas que incorporaron Optune Gio a la quimioterapia* tenían más probabilidades de vivir más tiempo que las que solo usaban quimioterapia.



Casi la mitad de las personas que usan Optune Gio + quimioterapia* estaban vivas a los 2 años, comparado con 31 % de las personas con solo quimioterapia.

BETTER SURVIVAL AT 5 YEARS

Optune Gio +
chemotherapy*

13%

vs

Chemotherapy
alone

5%

Con Optune Gio más quimioterapia*: El crecimiento del tumor se retrasó un promedio de 2.7 meses más que las personas que solo recibieron quimioterapia (6.7 meses versus 4 meses).

Optune Gio trata la parte donde está el tumor glioblastoma multiforme **sin aumentar** los efectos secundarios **relacionados con la quimioterapia**.

En un estudio clínico grande, Optune Gio **se usó de manera segura junto** con quimioterapia por 5 años.

52 % de los pacientes presentó irritación leve a moderada debajo de los transductores, con solo 2 % de los pacientes presentando afectación grave en la piel.

*Temozolomida, también conocido como TMZ o Temodar®.

Consulte Información importante de seguridad en las páginas 14-15.

US-OPG-00444 v2.0 enero de 2025

Optune Gio para personas diagnosticadas recientemente con glioblastoma multiforme

Demostró que mantiene la calidad de vida[†]

Las personas que integraban Optune Gio a la quimioterapia en el estudio pudieron **mantener su calidad de vida (bienestar mental, emocional y físico)**.



Bienestar mental



Bienestar emocional



Bienestar físico



Jeanneane es una paciente que usa Optune Gio.

Antes de que comience la terapia con Optune Gio, considere algunos de los posibles beneficios y efectos secundarios. Algunos beneficios de Optune Gio pueden variar según su diagnóstico y plan de tratamiento.

[†]La calidad de vida se midió hasta 12 meses.

Las imágenes reflejan el estado médico de los pacientes en el momento en que se tomó cada foto.

Programa Optune Gio® Buddy

Si usted o un ser querido está considerando o recién empezó a usar Optune Gio, ayuda hablar con alguien que sepa cómo es Optune Gio. El programa Optune Gio Buddy lo conecta con usuarios o cuidadores que quieren compartir con usted lo que han aprendido.*

Puede hablar con un usuario actual o un compañero de atención sobre:

- Cómo integraron Optune Gio a su vida diaria
- Experiencias personales con Optune Gio
- Consejos para superar los retos y encontrar apoyo

Chatee con un amigo



Programe su llamada hoy mismo. 1-844-247-1636



Visite OptuneGioBuddy.com para registrarse

*Tenga en cuenta que no podemos darle recomendaciones médicas ni hablar de los resultados personales del tratamiento porque cada persona es diferente. Hable con su médico si tiene preguntas médicas.



Representación de actor

Las imágenes reflejan el estado médico de los pacientes en el momento en que se tomó cada foto.

MyNovocure®

El apoyo se creó pensando en usted

MyNovocure está aquí para ayudarlo a sentirse más seguro con sus siguientes pasos con recursos disponibles durante todo el tratamiento. Ya sea para responder sus preguntas o ayudarlo a volver a pedir suministros, el apoyo de MyNovocure está diseñado pensando en usted. Nuestro objetivo es darle apoyo personalizado desde el día 1 y en cada paso del camino.



Representación de actor

Las imágenes reflejan el estado médico de los pacientes en el momento en que se tomó cada foto.

Consulte Información importante de seguridad en las páginas 14-15.

Su equipo de MyNovocure

Con MyNovocure, usted tiene un equipo de expertos listo para apoyarlo durante todo su proceso de tratamiento. Su equipo está listo para ayudarlo con asistencia para reembolso, configuración y preguntas del dispositivo, educación sobre el producto y resolución de problemas. Su equipo de apoyo incluye:

- **Apoyo para reembolso:** Podemos ayudarlo a entender cómo obtener cobertura para su terapia de Novocure y minimizar su costo
- **Apoyo en el tratamiento:** Podemos ayudarlo respondiendo sus preguntas sobre el tratamiento y dándole apoyo durante todo su proceso
- **Apoyo con el dispositivo:** Lo ayudaremos a configurar su dispositivo, programar registros futuros y resolver cualquier problema que pudiera tener

Introducción

Una vez su proveedor de atención médica le recete Optune Gio, recibirá una llamada de bienvenida de un miembro del equipo de MyNovocure para ayudarlo a configurarlo con su tratamiento.

Apoyo para reembolso

Recomendación de expertos para guiarlo en el proceso de cobertura

Su equipo de MyNovocure trabajará para responder sus preguntas sobre economía, minimizar sus costos y ayudarlo a comenzar el tratamiento con Optune Gio de inmediato.

Su equipo de MyNovocure está aquí para usted

Puede confiar en que el equipo de MyNovocure está ahí para usted cuando lo necesite. MyNovocure puede ayudarlo respondiendo sus preguntas desde el momento en que le recetan el tratamiento y 24/7 durante todo su proceso de tratamiento.

Es importante saber que MyNovocure no puede dar recomendaciones médicas. Para asegurarse de que recibe el apoyo adecuado, asegúrese de preguntarle a su médico cualquier duda que tenga sobre el tratamiento.

Obtenga apoyo personalizado 24/7



Llame a MyNovocure
al 1-855-281-9301



Envíe un correo electrónico a
support@mynovocure.com

Información importante de seguridad

¿Para qué condiciones está aprobado el tratamiento con Optune Gio®?

Optune Gio es un dispositivo portátil, aprobado por FDA, indicado para tratar un tipo de cáncer del cerebro llamado glioblastoma multiforme (GBM) en pacientes adultos mayores de 22 años.

Diagnóstico reciente de glioblastoma multiforme

Si le diagnosticaron glioblastoma multiforme recientemente, Optune Gio se usa con una quimioterapia llamada temozolomida (TMZ) si:

- El profesional de atención médica que lo atiende le confirmó el diagnóstico de cáncer **Y**
- Lo operaron para extirpar la mayor cantidad posible del tumor

Glioblastoma multiforme recurrente

Si el tumor volvió a aparecer, Optune Gio se puede usar por sí solo, como alternativa a la terapia médica estándar, si:

- Ya lo trataron con operación y radiación, no funcionaron o ya no están funcionando **Y**
- Lo trataron con quimioterapia y el profesional de atención médica confirmó el glioblastoma multiforme

¿Quiénes no deben usar Optune Gio?

Optune Gio no es para todos. Hable con su médico si tiene:

- **Un dispositivo médico implantado (derivación programable), un defecto en el cráneo (hueso faltante sin reemplazo) o un fragmento de bala.** Optune Gio no se ha probado en personas con dispositivos electrónicos implantados, lo que puede provocar que los dispositivos no funcionen correctamente, ni se ha probado en personas con defectos en el cráneo o fragmentos de bala, lo que puede provocar que Optune Gio no funcione correctamente

- **Una Sensibilidad conocida a los hidrogeles conductores** (el gel en los módulos que se ponen en el cuero cabelludo, como los que se usan en los EKG). Cuando Optune Gio hace contacto con la piel, puede causar más enrojecimiento y picazón o, en raras ocasiones, puede provocar una reacción alérgica potencialmente mortal

No use Optune Gio si está embarazada o planea quedar embarazada.

Se desconoce si Optune Gio es seguro o eficaz durante el embarazo.

¿Qué debo saber antes de usar Optune Gio?

Optune Gio se debe usar únicamente después de recibir capacitación de personal calificado, como su médico, un enfermero u otro personal médico que ha recibido un curso de capacitación de Novocure®, el fabricante de Optune Gio.

- No use ninguna pieza que no se suministre con el kit de tratamiento Optune Gio que le envió Novocure o que le dio su médico
- No humedezca el dispositivo ni los transductores
- Si tiene una condición grave subyacente de la piel en el cuero cabelludo, discuta con su médico si eso podría impedir o interferir temporalmente el tratamiento de Optune Gio

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Optune Gio?

Los efectos secundarios más frecuentes de Optune Gio cuando se usa con quimioterapia (temozolomida o TMZ) son recuento bajo de plaquetas, náuseas, estreñimiento, vómitos, cansancio, irritación del cuero cabelludo por el dispositivo, dolor de cabeza, convulsiones y depresión. Los efectos secundarios más frecuentes cuando se usa solo Optune Gio son irritación del cuero cabelludo (enrojecimiento y picazón) y dolor de cabeza. Otros efectos secundarios son malestar, espasmos musculares, caídas y úlceras en la piel. Hable con su médico si tiene alguno de estos efectos secundarios o preguntas.

Visite [OptuneGio.com/Safety](https://www.optunegio.com/safety) para ver las Instrucciones de Uso (IFU) y obtener información completa sobre las indicaciones, las contraindicaciones, las advertencias y las precauciones del dispositivo.

Empodere su proceso de Optune Gio® con estos recursos



Resumen del sistema

- Explore los componentes de Optune Gio
- Aprenda cómo Optune Gio genera TTFIELDS que pueden retrasar o impedir que se separen las células glioblastoma multiforme



Videos del proceso de los pacientes

- Aprenda cómo otras personas llevaron la potencia de Optune Gio a su vida diaria



Conectar con la comunidad

- Conozca pacientes o cuidadores actuales de Optune Gio en eventos en persona virtuales o locales
- Conéctese en vivo por teléfono de manera individual con un paciente o cuidador actual de Optune Gio



Escanee aquí para obtener más información y recursos.

novocure®

©2025 Novocure GmbH. Todos los derechos reservados. MyNovocure, Novocure, y Optune Gio son marcas comerciales de Novocure GmbH.
US-OPG-00444 v2.0 enero de 2025

OPTUNE
GIO®