




**短い音が3回+2回
「ピピピ・ピピ」**

※ アラーム音は、主に3種類あります。音の長さや回数の違いがアラーム音の原因を特定するヒントになります。正確にトラブルを判断するために、アラームが鳴っている状態で問い合わせをするよう、患者さんにはお伝えください。

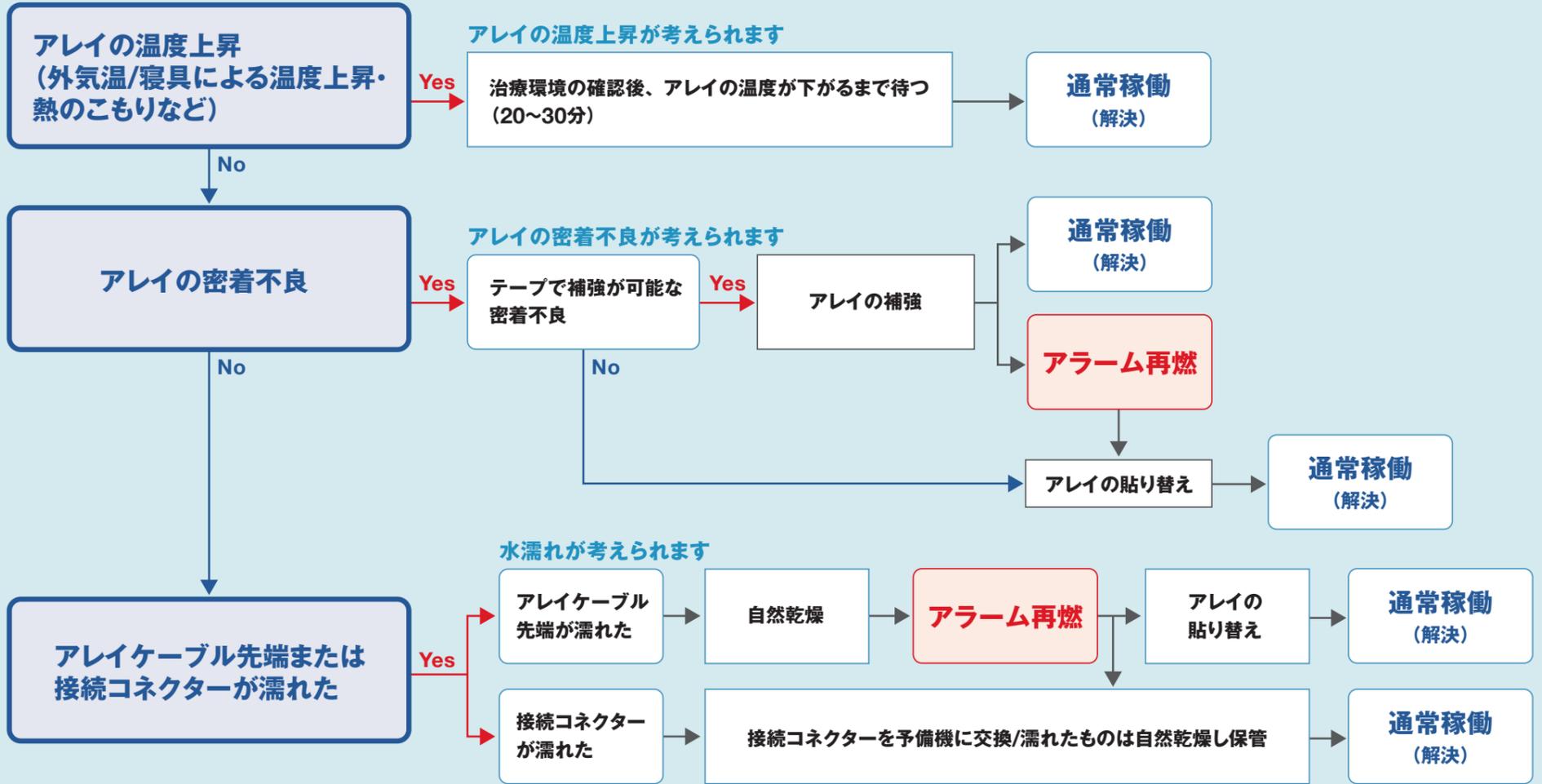

本資料を参照して解決できない場合は
デバイスサポートへ連絡

オプチュールア®のアラーム音が鳴ったときの トラブルシューティングガイド



アラーム音は、主に3種類あります。音の長さや回数の違いがアラーム音の原因を特定するヒントになります。
本資料を参照しても解決できない場合には、ノボキュア社のデバイスサポートまでご連絡ください。

アラーム音の種類	考えられる原因	トラブルシューティング
短い音が3回 「ピピピ」	<ul style="list-style-type: none"> 治療開始ボタン押し忘れ バッテリー残量なし その他 	p2参照
長い音が3回 「ピーピーピー」	<ul style="list-style-type: none"> 接続不良 	p3参照
短い音が3回+2回 「ピピピ・ピピ」	<ul style="list-style-type: none"> アレイによるアラーム 	p4参照


ノボキュア株式会社 デバイスサポート
TEL 050-3149-1020 24時間受付
 ※夜間(17:30~翌9:00)・土日・祝日は同番号で緊急時のみ対応

販売名:オプチュールア®
 承認番号:30700BZ100035000
 一般的名称:交流電場腫瘍治療システム JMDNコード:58845003
 高度管理医療機器:特定保守管理医療機器 クラスⅢ
 製造販売元:ノボキュア株式会社




**短い音が3回
「ピピピ」**

※ アラーム音は、主に3種類あります。音の長さや回数の違いがアラーム音の原因を特定するヒントになります。正確にトラブルを判断するために、アラームが鳴っている状態で問い合わせをするよう、患者さんにはお伝えください。

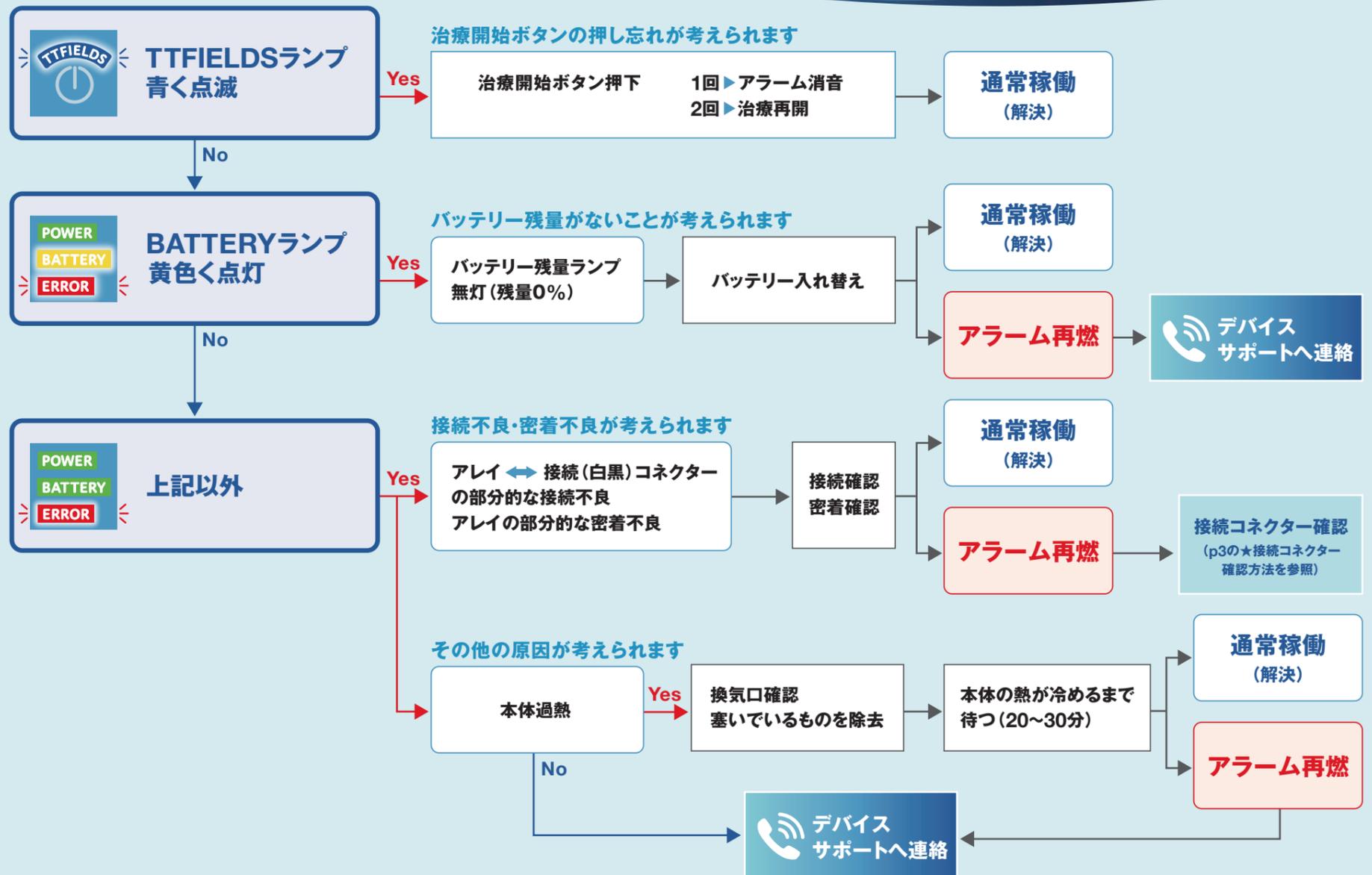

**長い音が3回
「ピーピーピー」**

※ アラーム音は、主に3種類あります。音の長さや回数の違いがアラーム音の原因を特定するヒントになります。正確にトラブルを判断するために、アラームが鳴っている状態で問い合わせをするよう、患者さんにはお伝えください。

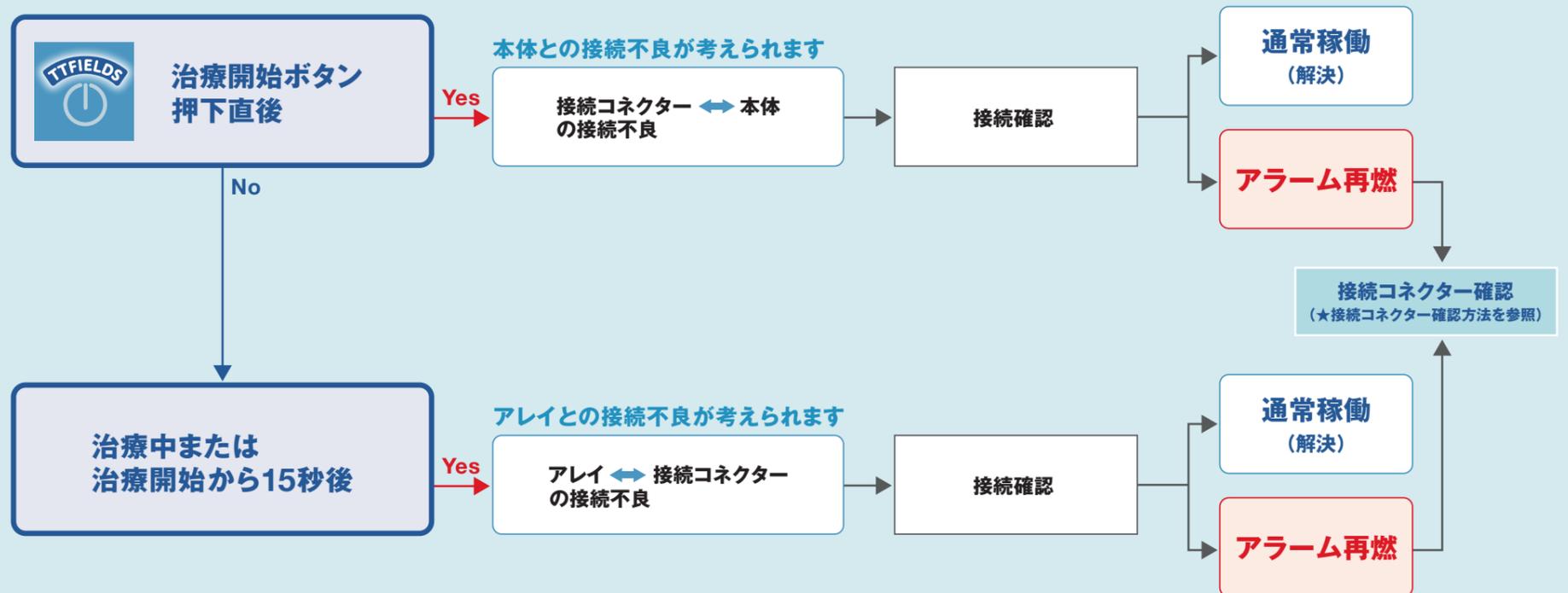

★ 接続コネクタ確認方法

接続コネクタの不良が考えられるため、予備の接続コネクタに接続して、アラームの原因が接続コネクタにあるかどうかを確認してください。

