

# オプチュールア®のアラーム音が鳴る原因と対処方法①

アラーム音は、主に3種類あります。音の長さや回数の違いがアラーム音の原因を特定するヒントになります。

本資料を参照しても解決できない場合には、ノボキュア社のデバイスサポートまでご連絡ください。

ランプとアラーム音	原因	アラームの止め方	対処方法	治療の再開
<p><b>短いアラーム音が3回「ピピピ」と鳴ったら</b></p>    <p>ERROR 点滅 + TTFIELDS 点滅 + アラーム音 短い音が3回</p>	<p>治療開始ボタンの押し忘れ</p> 		<p>アラーム消音後、治療の再開の手順を行う</p>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>治療開始ボタンを押す</li> <li>TTFIELDSランプが青く点灯したことを確認する</li> </ol>
   <p>BATTERY 黄色点滅 + TTFIELDS 消灯 + アラーム音 短い音が3回</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>アラーム音なし</b> BATTERY黄色点灯 ERROR消灯の場合は、 バッテリー残量が少ない(25%以下)状態です</p> </div>	<p>バッテリー残量なし(0%)</p> 	 <p>治療開始ボタンを押してアラーム消音</p>	 <p>主電源ボタンをオフにする</p>  <p>充電済みのバッテリーに交換する</p>	 <ol style="list-style-type: none"> <li>主電源ボタンをオンにして、セルフチェック終了を待つ</li> <li>治療開始ボタンを押す</li> <li>TTFIELDSランプが青く点灯したことを確認する</li> </ol>
   <p>ERROR 点滅 + TTFIELDS 消灯 + アラーム音 短い音が3回</p>	<p>上記以外の原因</p> 		<p>主電源ボタンをオフにして、以下を確認する</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アレイと皮ふが密着しているか</li> <li>・本体が過熱していないか</li> <li>・本体の換気口が塞がっていないか</li> </ul>	

二次元コードを読み取ってアクセスしていただくと、実際のランプとアラーム音をご確認いただけます。

ノボキュア株式会社 デバイスサポート(24時間受付)

TEL:050-3149-1020 ※夜間(17:30~翌9:00)・土日・祝日は同番号で緊急時のみ対応

# オプチュールア®のアラーム音が鳴る原因と対処方法②

アラーム音は、主に3種類あります。音の長さや回数の違いがアラーム音の原因を特定するヒントになります。  
本資料を参照しても解決できない場合には、ノボキユア社のデバイスサポートまでご連絡ください。

ランプとアラーム音	原因	アラームの止め方	対処方法	治療の再開
<p><b>長いアラーム音が3回「ピーピーピー」と鳴ったら</b></p> <p>ERROR 点滅</p> <p>TTFIELDS 消灯</p> <p>アラーム音 長い音が3回</p>	<p>接続不良</p>	<p>治療開始ボタンを押してアラーム消音</p>	<p>主電源ボタンをオフにして、以下を確認する</p> <p>接続コネクタと本体、接続コネクタとアレイの各コネクタがしっかり差し込まれているか確認する</p>	<p>① 主電源ボタンをオンにして、セルフチェック終了を待つ</p> <p>▼</p> <p>② 治療開始ボタンを押す</p> <p>▼</p> <p>③ TTFIELDSランプが青く点灯したことを確認する</p>
<p><b>短いアラーム音が3回+2回「ピピピ・ピピ」と鳴ったら</b></p> <p>ERROR 点滅</p> <p>TTFIELDS 消灯</p> <p>アラーム音 短い音が3回+2回</p>	<p>アレイの過熱 (最高温度超え)</p>	<p>治療開始ボタンを押してアラーム消音</p>	<p>主電源ボタンをオフにして、以下を確認する</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・涼しい場所に移動して、治療を約20～30分中止し、アレイをクールダウンする</li> <li>・アレイを手で押さえ、アレイと皮ふを密着させる</li> </ul>	<p>③ TTFIELDSランプが青く点灯したことを確認する</p>

二次元コードを読み取ってアクセスしていただくと、実際のランプとアラーム音をご確認いただけます。

販売名：オプチュールア®  
一般的名称：交流電場腫瘍治療システム

