

オプチューン®を高温多湿の時期に 使用される際にご注意いただきたいこと

オプチューンのバッテリーにはリチウム二次電池を使用しています。また、トランスデューサーアレイはゲル状の粘着剤を使用しています。
このため必ず直射日光・高温・多湿を避けて涼しいところでご使用及び保管
ください。


高温多湿の環境下で長時間、使用及び保管すると適正に使用できなくなる可能性があります。



お願い

オプチューン本体・バッテリー・バッテリー充電器・
トランスデューサーアレイは、直射日光のあたる窓際や車内、
湿気の多い浴室の周辺などに放置しないでください。

直射日光のあたる窓際

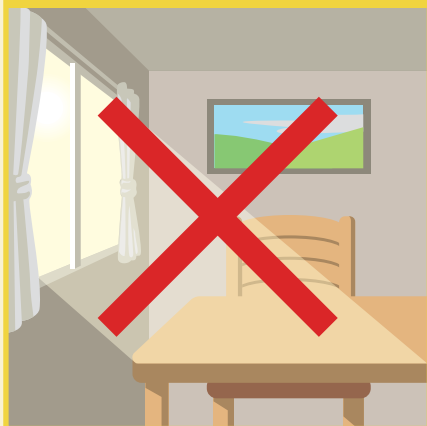

車内



浴室の周辺



次のような場合はバッテリーの故障が考えられます。

- ➔ 充電しようとしても通常よりも時間がかかる
- ➔ バッテリーを交換しても、ERRORランプが点灯する

その他、製品の取り扱いについては下記お問い合わせ窓口へご連絡ください。

ノボキュア株式会社 お問い合わせ窓口

TEL 050-3149-1020

※夜間 (17:30-翌9:00)・土日・祝日は、緊急時のみ対応